


Tirer sur le patch pour le retirer

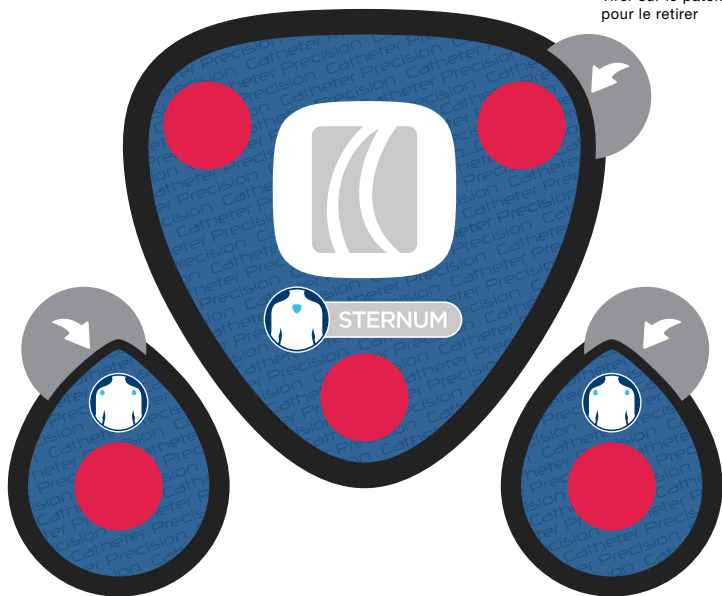

Ces patches de positionnement sont à usage unique.



Saisir le numéro de série des patches dans l'application VIVO. L'image 3D ne peut être prise qu'après saisie du numéro de série à usage unique.



Catheter Precision Inc.

1670 Highway 160 West, Suite 205

Fort Mill, SC 29708, USA

Telephone: +1 (973) 691-2000

www.catheterprecision.com



USE BY:



YYYY-MM-DD

SN

###-###-###

Rx only

MD

Instructions pour l'application des patchs de positionnement

Fixation des patchs de positionnement


Les points d'application doivent être propres secs et exempts de toute lotion corporelle pour garantir une adhérence optimale du patch à la peau. Suivre les pratiques habituelles utilisées pour fixer/enlever les électrodes ECG.

Placement du patch de positionnement sur le sternum

Le patch pour sternum doit être placé avec le haut du patch au centre (ligne pointillée verte) du sternum.

Placement des patchs de positionnement sur les épaules

Placer les patchs pour épaule droite et pour épaule gauche de manière à ce qu'ils définissent latéralement la limite extérieure du corps (lignes verticales pointillées bleues) et soient parallèles à la hauteur de l'épaule (ligne continue rouge).

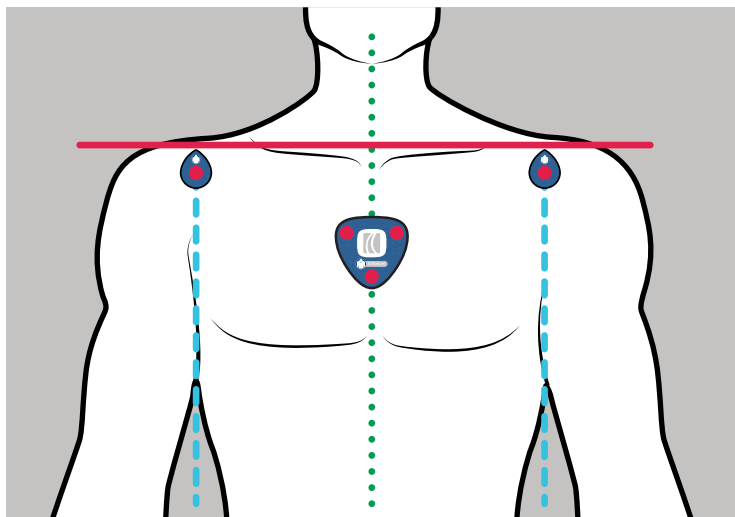

ATTENTION : si les patchs ne sont pas placés au bon endroit anatomique, les résultats VIVO peuvent être incorrects.

Des questions ou des commentaires ?

Contactez-nous au CustomerService@CatheterPrecision.com