


Remover ao tirar para fora

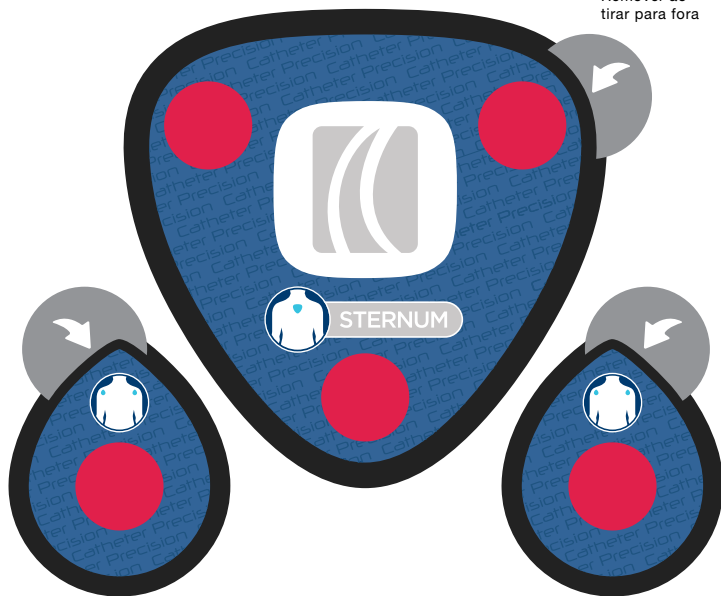

Estes patches de posicionamento destinam-se apenas a uma única utilização.



Introduzir o número de série referente aos patches na aplicação VIVO. Não pode ser obtida uma imagem em 3D sem introduzir o número de série único.



Catheter Precision Inc.

1670 Highway 160 West, Suite 205

Fort Mill, SC 29708, USA

Telephone: +1 (973) 691-2000

www.catheterprecision.com



USE BY:



YYYY-MM-DD

SN

###-###-###

Rx only

MD

Instruções de Aplicação do Patch de Posicionamento

Como ligar os patches de posicionamento


Os locais de aplicação devem estar limpos, secos e isentos de qualquer loção corporal, a fim de proporcionar uma ótima adesão do patch à pele. Seguir a prática padrão para colocar/remover os elétrodos de ECG.

Colocação do Patch de Posicionamento no esterno

O patch do esterno deve ser colocado com a parte superior do patch no centro (linha vertical verde pontilhada) do esterno.

Colocação do Patch de Posicionamento no ombro

Colocar o patch no Ombro Direito e no Ombro Esquerdo de modo a que definam o limite externo do corpo lateralmente (linhas verticais tracejadas em azul), e que fiquem paralelos à altura do ombro (linha sólida vermelha).

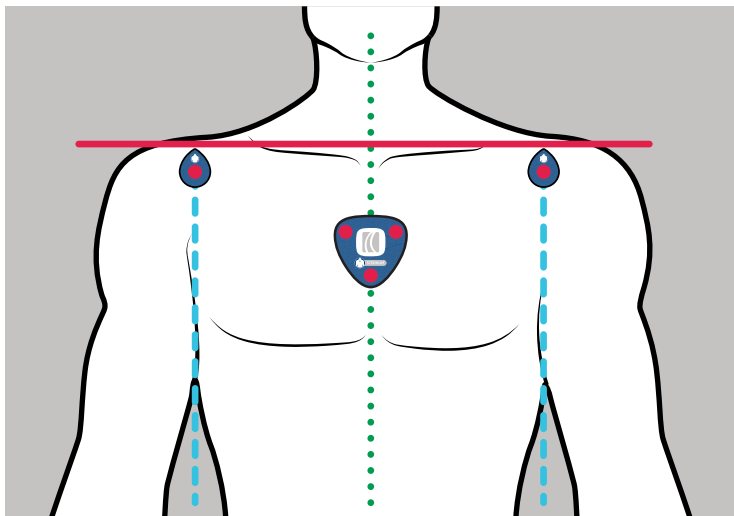

ATENÇÃO: se os patches não forem colocados no local anatómico correto, os resultados do sistema VIVO podem ser incorretos.

Perguntas ou Comentários?

Contacte-nos em CustomerService@CatheterPrecision.com